

# Augenspüllösung 500ml

**Beschreibung:** Sterile Natriumchloridlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht.

Wichtiger Hinweis: Produkt zur einmaligen Benutzung. Nach Ablauf des Verfalldatums (s. Flaschenetikett) nicht mehr einsetzen. Die Versiegelung der Flasche muss unversehrt sein, um eine einwandfreie Handhabung zu gewährleisten. Bei Wiederverwendung von angebrochenen Flaschen besteht ein Infektionsrisiko.



**Stückzahl:** Flasche 500 ml

Art.Nr. 4540

Flasche

500 ml

**Optik:** Durchsichtig, mit grüner Augenschale

## Eigenschaften

- Hohe Funktionssicherheit
- Für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet (auch das Mitführen in Fahrzeugen)
- Wartungsfrei
- Lange Haltbarkeit - ungeöffnet 3 Jahre haltbar und einsetzbar

## Vorteile

- Gut verträgliche, isotonische Flüssigkeit
- Ergonomisch geformte Augenschale inkl. Staubkappe, was einen gleichmäßigen & weichen Sprühstrahl ermöglicht
- Schnell & mit nur zwei Handgriffen zu verwenden

## Konformität

- DIN EN 15154-4 - Augenduschen ohne Wasseranschluss
- 93/42/EWG - Medizinprodukt der Klasse I

## Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

## Anwendung



| 1<br>Bestimmen Sie den Schadstoff                                   | 2<br>Wählen Sie die richtige Flasche & Spüllösung | 3<br>Setzen Sie die Spülung fort | 4<br>Spülen Sie wie angegeben   |
|---|---|----------------------------------|---|
| <b>Fremdkörper</b><br>z.B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter | Plum Augenspüllösung                              | Plum Augenspüllösung             | Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.   |
| <b>Säuren</b>   | pH-Neutral  | Plum Augenspüllösung             | Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.     |
| <b>Basen</b>  | pH-Neutral  | Plum Augenspüllösung             | Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.     |
| <b>Andere Chemikalien</b><br>z.B. Lösungsmittel & Öle               | Plum Augenspüllösung                              | Plum Augenspüllösung             | Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen. |

### Anwendung (siehe auch Bildanleitung):

- Nehmen Sie die Flasche aus der Box.
- Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.
- Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen.
- Alternativ: mit vorgebeugtem Kopf die Augen von unten spülen.

**Wichtig:** Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflasche während des Spülvorgangs nur leicht zusammendrücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte während des Transportes zum Arzt fortgeführt werden.



## Kompatible Systemprodukte



Augen-Notfallstation - Art.Nr. 4542

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

**hollu Systemhygiene GmbH**

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com)  
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | [info@hollu.it](mailto:info@hollu.it)

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 11/2020

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

