

Augen-Notfallstation

Beschreibung: Wandstation mit 1 x 200ml pH-neutral sowie 1 x 500ml Augenspüllösung.
Stückzahl: Karton 1 Stk.
Optik: Grün



Art.Nr. 4542

Karton

1 Stk.

Eigenschaften

- Integrierter Spiegel sowie Piktogramme
- Inklusive Augen-Notfallplan

Vorteile

- Platzsparende Möglichkeit, um einen schnellen & leichten Zugriff im Erste-Hilfe-Fall
- Geeignet zur Wandmontage
- Sichert eine rasche und effektive Augenspülung

Nachhaltigkeit und Ökologie

Nachhaltigkeit prägt unser gesamtes Denken und Handeln, was u.a. die Zertifizierungen ISO 14001 und EMAS belegen. Auch im Produktlebenszyklus achten wir auf einen schonenden Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen: von der Rohstoffauswahl über die Produktion und Auslieferung bis hin zur automatischen Mitnahme der hollu Leergebinde und dem Recycling. Die hollu Gebinde, bestehend aus PE und Karton, können auch restentleert an den entsprechenden Abfall-Sammelstellen entsorgt werden. Unsere Kunden unterstützen wir nachhaltig mit Schulungen, Reinigungsplänen und innovativer Dosiertechnik.

Anwendung



1 Bestimmen Sie den Schadstoff	2 Wählen Sie die richtige Flasche & Spüllösung	3 Setzen Sie die Spülung fort	4 Spülen Sie wie angegeben
Fremdkörper z.B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säuren	pH-Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Basen	pH-Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Andere Chemikalien z.B. Lösungsmittel & Öle	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

Anwendung (siehe auch Bildanleitung):

- Nehmen Sie die Flasche aus der Box.
- Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.
- Den Kopf zurücklehnen, Flasche leicht zusammendrücken und spülen.
- Alternativ: mit vorgebeugtem Kopf die Augen von unten spülen.

Wichtig: Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllflasche während des Spülvorgangs nur leicht zusammendrücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte während des Transportes zum Arzt fortgeführt werden.

Kompatible Systemprodukte



Augenspüllösung 500ml - Art.Nr. 4540 & Augenspüllösung pH-neutral 200ml - Art.Nr. 4539

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | info@hollu.it

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 11/2020

Irrtümer, Satz- & Druckfehler, sowie Änderungen vorbehalten.

so geht sauber.

