

Perform
Flächendesinfektion

Eigenschaften:

Aussehen: weißes Granulat
Schüttgewicht: 755 kg/m³

Zusammensetzung und Wirkung:

Perform stellt eine Flächendesinfektion auf Basis einer Aktivsauerstoffverbindung dar.

Anwendungsvorschrift:

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren.

Beispielsweise:

1 Beutel (40 g) für 8 l Wasser = 0,5 %ige Lösung; 2 Beutel (40 g) für 8 l Wasser = 1 %ige Lösung

Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeiten:

Wirksamkeiten	1 Min.	5 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.	2 Std.	4 Std.
VAH-Liste Flächendesinfektion							
in Krankenhaus und Praxis				1% (10g/l)	0,5% (5g/l)		0,25% (2,5g/l)
hohe Belastung				1% (10g/l)	0,75% (7,5g/l)		
ÖGHMP-Expertise Nr. 95/14				1% (10g/l)	0,5% (5g/l)		0,25% (2,5g/l)
Tb				3 % (30g/l)	2% (20g/l)		1,5% (15g/l)
viruzid *				2% (20g/l)			
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV)		0,5% (5g/l)					

Wirksamkeiten	1 Min.	5 Min.	10 Min.	30 Min.	60 Min.	2 Std.	4 Std.
Viren:							
- Adeno		0,5% (5g/l)					
- Polio				2% (20g/l)			
- Vaccina		0,5% (5g/l)					
- Polyoma SV 40	0,5% (5g/l)						
- Rota	0,5% (5g/l)						
- Noro**							
- niedrige Belastung		0,5% (5g/l)					
- hohe Belastung				0,5% (5g/l)			
Sporen gemäß modifizierter DIN (EN 13 697), ohne Belastung						1% (10g/l)	
Kurzzeitdesinfektion von Badewannen		1,5% (15g/l)	0,75% (7,5g/l)				
RKI-Listung gemäß § 18 IfSG (Scheuerdesinfektion) Wirkungsbereich AB***							3 % (30g/l)

*) gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

**) geprüft mit neuem Prüfvirus Murines Noro-Virus

***) siehe auch Hinweis in der RKI-Liste

Gefahrenhinweis und Sicherheitsratschläge:

Beim Einsatz des Produktes sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den entsprechend gültigen Sicherheitsdatenblättern.

Lagerhinweis:

Perform im Originalgebinde gut verschlossen bei Raumtemperatur lagern.

PRODUKTINFORMATION



Hitze und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Gebinde: Art.Nr. 4450 Karton 60 x 40 g Beutel

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch, aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweisen, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften! 1T104